

MASKE wesp^{ir} premium+

DREISCHICHTIGE SCHALEN- MASKE

Maske der Kategorie 1

(91% Filterung von Partikeln > 3 µm (Mikron).

Atmungsaktivität: Luftdurchlässigkeitstest

> 96L.m².s-1 bei einem Unterdruck von 100 Pa.

Außenschicht

aus gestepptem Netzstoff
3D-Netz (leicht und atmungsaktiv).

Mittlere Schicht

100% Baumwolle 190 gr.

Innenlage

Hergestellt aus Viskose-Polyester 180 gr.

Verstellbarer
Nasenbügel

Für mehr
Komfort die
Maske "abdecken",
um den Kontakt
des Mundes mit
dem Stoff zu
begrenzen.

Verstellbare Träger.



All unsere Stoffe
sind Oeko-tex-zertifiziert

Schutzmasken AFNOR SPEC S76-001 :2020

DGA-Testprotokoll vom 25. März 2020. Von den Laboratorien von IFTH, Avenue Guy de Collongue, 69134 Écully
(Bericht 2020-07-31-005-0); für 50 Waschgänge geeignet (Bericht 20-03015).

Wie wird die Maske richtig getragen?

Damit die Schutzmaske wirksam ist, muss sie richtig verwendet und getragen werden: Direkt auf der Haut (ohne dazwischen liegende Haare) und möglichst auf rasierter Haut. Vor jeder Verwendung müssen die Hände mit Wasser und Seife gewaschen oder mit einem hydroalkoholisches Gel desinfiziert werden.

Wie wird die Schutzmaske richtig angepasst?



1) Die Maske um die Ohren legen, indem man sie an den (Gummi-)Bändern greift, ohne die Vorderseite der Schutzmaske aus Stoff zu berühren. Die Oberkante der Maske ist am Nasensteg erkennbar.



2) Die Unterkante der Schutzmaske unter das Kinn ziehen. Dabei nur am Rand berühren.



3) Den Nasensteg zusammendrücken, damit die Maske gut anliegt. Sobald sie angepasst ist, die Schutzmaske nicht mehr berühren.



Wie wird die Schutzmaske abgenommen?

Um jegliche Ansteckung beim Abnehmen der Schutzmaske zu verhindern, muss sie vorsichtig abgenommen und vor dem Wegwerfen oder Waschen isoliert werden:

- 1) Wenn nötig, die Schutzhandschuhe ausziehen, die Hände mit Wasser und Seife waschen oder mit einer hydroalkoholischen Lösung desinfizieren.
- 2) Die Riemen, Gummibänder bzw. Schlaufen von hinten fassen, ohne die Vorderseite aus Stoff zu berühren.
- 3) Zu waschende Schutzmasken in einen speziellen Waschbehälter geben. Jeglichen Kontakt zwischen einer verschmutzten Schutzmaske und sauberer Wäsche vermeiden. Wegwerfmasken in einen anderen Spezialbehälter speziell für Wegwerfmasken geben. Stets darauf achten, die Vorderseite der Maske aus Stoff nicht zu berühren.
- 4) Die Hände mit Wasser und Seife erneut waschen oder mit einer hydroalkoholischen Lösung desinfizieren.


Die Schutzmaske waschen, trocknen oder wegwerfen



Beim Umgang mit verschmutzten Masken sich entsprechend schützen.
> Es empfiehlt sich, vor dem Waschen der Schutzmasken die Waschmaschine zu reinigen, indem man sie mit Bleichmittel kalt spült oder bei 60°C oder 95°C ohne Schleudern leer laufen lässt.



> Ihr normales Waschmittel verwenden. Ein Weichspüler wird nicht empfohlen.
> Der Waschgang (Einweichen, Waschen, Spülen) muss mindestens 30 Minuten bei einer Temperatur von 60°C dauern.

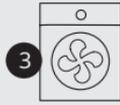

> Die Schutzmaske darf nicht luftgetrocknet werden: Sie muss mechanisch in einem Wäschetrockner getrocknet werden, dessen Filter danach gereinigt werden sollten (anschließend die Hände waschen).
> Vor der erneuten Verwendung muss die Maske vollständig trocken sein.



> Außerdem sollte die Maske für eine komplette Desinfektion bei einer Temperatur zwischen 120°C und 130°C gebügelt werden.

Sollten Schäden an der Schutzmaske (Verformungen, Verschleiß, usw.) festgestellt werden, muss die Maske entsorgt werden.

Lebensende einer Maske

Um eine Schutzmaske zu entsorgen, muss diese verpackt werden, bevor sie in den Mülleimer (mit Beutel) geworfen wird. Diese doppelte Verpackung sorgt zwar leider für zusätzlichen Abfall, ist aber notwendig.

4 Stunden 50 Waschgänge

Trage- und Lebensdauer einer Maske

Sie muss jedes Mal gewaschen werden, wenn sie schmutzig oder nass ist. Sie sollte während oder nach der Verwendung nicht zwischendurch auf die Stirn oder unter das Kinn geschoben werden. Die Tragedauer darf höchstens 4 Stunden betragen (das entspricht einem halben Arbeitstag). Innerhalb dieser vier Stunden darf die Maske nur dann mehrmals verwendet werden, wenn sie vorschriftsmäßig abgenommen, mit möglichst wenig Kontakt verstaubt oder aufgehängt und danach wieder vorschriftsmäßig angelegt wurde. Damit eine Maske erneut vier Stunden getragen werden kann, muss sie unbedingt zuvor gewaschen werden. Unsere Masken überstehen 50 Waschgänge. Sie müssen am Ende des Lebenszyklus unbedingt weggeworfen werden.

WARNHINWEIS

Das Tragen der Maske entbindet den Benutzer keinesfalls von der notwendigen räumlichen Distanzierung.

Lagerung: Nicht gebrauchte Masken müssen sauber und trocken in einer sauberen, luftdichten Verpackung aufbewahrt und lichtgeschützt gelagert werden. Anwendungskontext: Diese Maske erfüllt die strikten Schutzkriterien im Rahmen der Corona-Krise.

Dieser Artikel ist weder ein Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 (chirurgische Masken) noch eine persönliche Schutzausrüstung im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425 (Filtermasken vom Typ FFP2).